



SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinate con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o assenti mailturn-ment, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

CE

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
f @ in

Rev. 9 - 07/22

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

INDICAZIONI: distorsioni di caviglia I, II, III grado; esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarsi; trattamento della pseudoartrosi base V metatarsi; esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc; di fratture pilone tibiale; post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

AVVERTENZE D'USO

- Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 Kg.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo.
- La modificazione/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).



FGP
Orthopedic & Rehabilitation Equipment

CVO 750 ECO DELUX
CVO 750 ECO SMART
Tutore walker per tibio-tarsica Economy

STRUTTURA

- imboitura in tessuto accoppiato con vellutino gripante all'interno
- accoppiato con vellutino gripante all'interno e all'esterno (versione SMART); imboitura pneumatica in tessuto
- piantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing
- kit di imboiture per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza mediale laterale

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- un unico pezzo composto da scato e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- pannello frontale flessibile e removibile
- protezione delle dita regolabile e removibile

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imboitura e 4 fasce di fissaggio

Taglia Calzata scarpa MISURE (Ambidestro)

Taglia	S	M	L
36-40			
40-44			
44-47			

ALTEZZA 38 cm

Altre informazioni:

- CVO-750 ECO NP (SMART, non pneumatico)**
- CVO-750 ECO N (DELUX, pneumatico)**

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE:

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

1. Rimuovere l'ortesi dall'involucro di plastica, aprire tutti i nastri a strappo delle cinghie e staccare lo stivaletto dalla base.
2. Aprire la chiusura frontale dello stivaletto. Chiedere al paziente di inserire il piede e il polpaccio nello stivaletto (fig. 1).
3. Chiudere la chiusura frontale dello stivaletto (fig. 2).
4. Chiedere al paziente di posizionare il piede nello scafo del tutore all'interno del guscio.
5. In dotazione ci sono dei comodi cuscinetti in materiale espanso che possono essere spostati per aumentare il comfort oppure rimossi per aumentare l'ampiezza mediolaterale tra le aste (fig. 3).
6. Il nastro a strappo all'interno del guscio aderirà allo stivaletto.
7. Posizionare il pannello frontale (fig. 4).
8. Il pannello frontale se necessario è removibile (fig. 5).
9. Stringere le cinghie dell'avampiede (fig. 6).
10. Stringere le cinghie che fissano il polpaccio al guscio, partendo dalla cinghia più vicina alla caviglia (fig. 7).

Chiedere al paziente di camminare con l'ortesi per accertarsi che essa sia stata applicata e funzioni correttamente.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE






Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile togliere l'ortesi semplicemente aprendo le cinghie e la chiusura frontale dello stivaletto. In tal modo, il paziente potrà riapplicare lo stivaletto e l'ortesi con l'adeguato allineamento della gamba.

VERSIONE PNEUMATICA:

Per gonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "INFLATE" fino a chiusura, quindi gonfiare con la pompetta nera (fig. B) fino a quando l'imbottitura risulterà confortevole.

ATTENZIONE: una eccessiva compressione può ridurre la circolazione del sangue.

Per sgonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "DEFLATE" fino a chiusura, l'imbottitura si sgonfia automaticamente, per accelerare lo sgonfiaggio dell'imbottitura premere la pompetta nera.

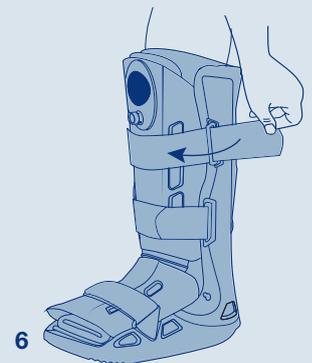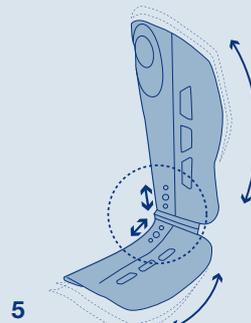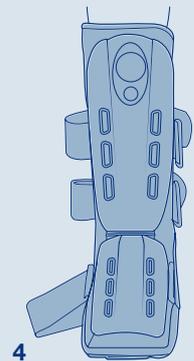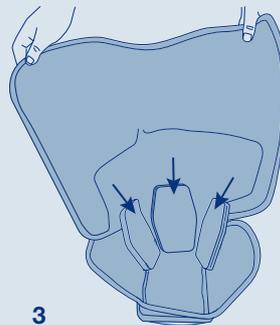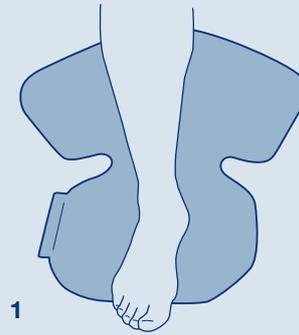

A

B